

Pflegehinweise für Schampi Stützkissen

Überprüfen Sie regelmäßig den Schutzbezug auf sichtbare Verschmutzung sowie auf Beschädigung wie Risse und Löcher.

Die Oberfläche des Schutzbezugs besteht aus Polyurethan und kann mit handelsüblichen, auf Seife basierenden Reinigern, gereinigt werden. Achten Sie bitte auf die Herstellerhinweise des Reinigungsmittels. Verwenden Sie bitte keine Konzentrate.

Verwenden Sie bitte keine auf Chlor basierenden Reinigungsmittel

Das Stützkissen wird mittels Wischdesinfektion mit auf Alkohol basierenden Desinfektionsmittel desinfiziert.

Ein Weichspüler zerstört die Oberfläche des Polyurethanschutzes bezüglich der Flüssigkeits- abweisenden Eigenschaften und darf nicht verwendet werden.

Bei der Verwendung von Reinigungs - und Desinfektionsmitteln immer die Sicherheitshinweise des Herstellers beachten.