

SEAL PROTECT® CAST COVER

Der SealProtect bietet sicheren Nässeschutz für (Gips-)Verbände und die Haut beim Duschen. Der Duschprotector ist wiederverwendbar und einfach anzubringen. Dank des starken Kunststoffringes und des robusten Silikonmaterials im Ring schließt die Gipsabdeckung immer wasserdicht. Das strapazierfähige Taftvinyl, aus dem der Duschprotector gefertigt ist, gewährt lange Lebensdauer.




CM

SIZING GUIDE - ANLEITUNG

Um die richtige Größe des Verbandsschutzes zu ermitteln, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen.

MESSEN SIE BIS ZUM
ENDE DES GIPSES

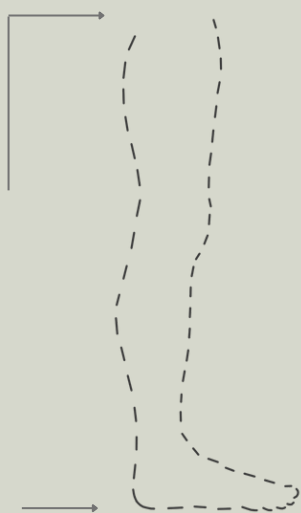

MESSEN SIE VON
DER FERSE WEG

MESSEN SIE BIS ZUM
ENDE DES GIPSES



MESSEN SIE VON
DER FINGERKUPPE DES
MITTELFINGERS WEG



LÄNGE 102 CM
Ø 25 CM

LÄNGE 61 CM
Ø 19 CM

LÄNGE 32 CM
Ø 19 CM

SIZING GUIDE – BEIN

WICHTIG: Um die richtige Größe zu ermitteln, messen Sie von der Ferse bis zum Ende Ihres Gipses. Addieren Sie dann 4 cm zu Ihrem Maß hinzu, um die richtige Länge der Abdeckung zu erhalten. Achten Sie bei einem großen oder breiten Verband auch auf den Durchmesser des Rings. In diesem Fall wählen Sie bitte einen Duschbezug in einer größeren Größe, mit einer breiteren Öffnung.

Alle scharfen Gegenstände entfernen und gegebenenfalls zuerst einen Strumpf oder einen Socken über den Gips oder Verband ziehen.

Halten Sie den Kunststoffring fest und machen Sie mit Ihren Händen eine große Öffnung. Nachdem Sie das gemacht haben, ziehen Sie die Hülle über den Gips oder Verband.

Achten Sie darauf, dass die Abdeckung mindestens 3 cm über dem Gips oder Verband schließt, um somit einen möglichst vollständigen Schutz zu bieten.

Schieben Sie den Kunststoffring vorsichtig leicht nach hinten, sodass der Rand der Öffnung nach oben zeigt. Abschließend soll man nach dem Abnehmen der Duschabdeckung diese trocknen lassen.

SIZING GUIDE - ARM



LÄNGE 66 CM
Ø 19 CM

WICHTIG: Messen Sie von der Fingerkuppe des Mittelfingers bis zum Ende des Gipses. Addieren Sie dann 4 cm zu Ihrem Maß hinzu, um die richtige Länge der Abdeckung zu ermitteln. Achten Sie bei einem großen oder breiten Verband auch auf den Durchmesser des Rings. In diesem Fall wählen Sie bitte einen Duschbezug in einer größeren Größe, mit einer breiteren Öffnung.



LÄNGE 51 CM
Ø 15 CM

Alle scharfen Gegenstände entfernen und gegebenenfalls zuerst einen Strumpf oder einen Socken über den Gips oder Verband ziehen.

Halten Sie den Kunststoffring fest und machen Sie mit Ihren Händen eine große Öffnung. Nachdem Sie das gemacht haben, ziehen Sie die Hülle über den Gips oder Verband.

Achten Sie darauf, dass die Abdeckung mindestens 3 cm über dem Gips oder Verband schließt, um somit einen möglichst vollständigen Schutz zu bieten.



LÄNGE 32 CM
Ø 15 CM

Schieben Sie den Kunststoffring vorsichtig leicht nach hinten, sodass der Rand der Öffnung nach oben zeigt. Abschließend soll man nach dem Abnehmen der Duschabdeckung diese trocknen lassen.

SEAL PROTECT® EIGENSCHAFTEN

DAS SILIKONMATERIAL SORGT FÜR EINE GUTE ABDICHTUNG GEGEN DAS EINDRINGEN VON WASSER



DER STARKE KUNSTSTOFFRING GEWÄHRLEISTET EINE GUTE HALTBARKEIT DER HÜLSE

LEICHT ZU VERSTAUEN ODER IN TASCHEN ZU TRAGEN



DER BEZUG IST WASSERABWEISEND UND BESTEHT AUS VINYLMATERIAL. ER ENTHÄLT AUCH EINE SILIKONDICHTUNG

SIZING GUIDE - ANLEITUNG

Die SealProtect Duschhauben sind nur zum Duschen geeignet. Man darf sie nicht für den Freizeitgebrauch wie Schwimmen oder zum Baden verwenden. Vor jedem Gebrauch muss man den Bezug auf Mängel oder Risse prüfen, um eine Beschädigung des Gipses oder des Verbands vorzubeugen. Bevor man den Bezug für die Lagerung bereit macht, muss dieser gründlich trocken.

VORSICHTIG! Der Bezug kann bei dem Kontakt mit Wasser rutschig werden. Kinder sollen beim Verwenden dieses Produktes von Erwachsenen beaufsichtigt werden. Der Kunststoffring ist nicht dafür ausgelegt, schweres Gewicht zu tragen. Die Duschhauben dürfen nicht auf der Heizung trocknen!



LATEXFREI!

SEAL PROTECT® SIZING CHARTS

ERWACHSENE

ARTIKELNUMMER	GRÖSSENBEREICH	BESCHREIBUNG
TH 18210013	Ø 15 cm, Länge 51 cm	UNTERARM
TH 18210113	Ø 19 cm, Länge 66 cm	OBERARM
TH 18210213	Ø 19 cm, Länge 32 cm	KNÖCHEL
TH 18210313	Ø 19 cm, Länge 61 cm	WADE
TH 18210413	Ø 15 cm, Länge 32 cm	HAND
TH 18210513	Ø 25 cm, Länge 102 cm	OBERSCHENKEL
TH 18211313	Ø 25 cm, Länge 57 cm	WADE EXTRA

KINDER

ARTIKELNUMMER	GRÖSSENBEREICH	BESCHREIBUNG
TH 18212413	Ø 15 cm, Länge 32 cm	ARM - S
TH 18212013	Ø 15 cm, Länge 50 cm	ARM - M/L
TH 18212113	Ø 19 cm, Länge 44 cm	BEIN - M
TH 18212313	Ø 15 cm, Länge 23 cm	BEIN - S
TH 18212313	Ø 19 cm, Länge 61 cm	BEIN - L