

## Wichtiger Hinweis

Die BS-**SOFT-CAST**-Scheren sind ausschließlich für das Bearbeiten von **SOFT-CAST** konzipiert und von einer Verwendung als Universal-Verbandschere ist abzuraten.

Schneidegut, welches nicht den Eigenschaften von **SOFT-CAST** entspricht, führt teilweise zu einer starken Verkürzung der Einsatzdauer. Dies hat nicht selten eine aufwändige Reparatur zur Folge, in manchen Fällen ist ein Herstellen der Schereneigenschaft nicht mehr möglich und ein Austausch erforderlich.

## Reparatur

Vor jedem Einsatz der BS-**SOFT-CAST**-Scheren sind diese auf Brüche, Risse, Verformungen, Beschädigungen und Funktionstüchtigkeit zu untersuchen. Besonders sorgfältig ist die Schnittkante zu prüfen. Tiefe Einschnitte im Bereich der Schneide deuten auf eine nicht sachgemäße Handhabung hin und beeinträchtigen die Schnittleistung. Abgenutzte, korrodierte, deformierte, poröse oder anderweitig beschädigte Produkte müssen aussortiert werden.

Weitere Details erhalten Sie unter [www.cast-scheren.de](http://www.cast-scheren.de)

## Kontakt

**Berger Surgical  
Medical Products GmbH**  
Kirchstraße 22  
D 78532 Tuttlingen

Tel. +49 (0)7461 9696-0  
Fax: +49 (0)7461 9696-20  
E-Mail: [info@berger-surgical.de](mailto:info@berger-surgical.de)

# SOFT-CAST-Scheren



Die **BS-SOFT-CAST**-Scheren, kein Wunder der Natur, sondern das Ergebnis jahrelanger Weiterentwicklung einer Verbandschere, in Zusammenarbeit von Herstellern und Anwendern von **SOFT-CAST**-Produkten.

Rund um die **BS-SOFT-CAST**-Scheren möchten wir Ihnen bei der Wahl der richtigen Schere behilflich sein. Wir berichten über die verschiedenen Möglichkeiten, stellen Unterlagen zur Verfügung, alles auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

**CAST**, fachlich übersetzt auch Gipsverband, ist heute ein allgegenwärtiges und vielfältiges Produkt und nicht nur in Krankenhausambulanzen und Praxen ein ständiges Hilfsmittel.

Hat man früher nur Weißgips eingesetzt und verarbeitet, so ist die Materialvielfalt in den letzten Jahren gestiegen, somit die Ansprüche an die Verarbeitung und den Erfolg des **GIPSVERBANDES** insgesamt neu entwickelt worden.

Weißgips ist heute noch weit verbreitet und stellt die günstigste Variante dar. Er wird immer noch für Knochenbrüche aller Art an Armen und Beinen verwendet. Die Weiterentwicklung der letzten Jahre hat dazu geführt, dass führende Hersteller einen besser zu verarbeitenden, mit entsprechenden guten Stabilisierungsmöglichkeiten ausgestatteten **SOFT-CAST** entwickelt haben.

Über die Vorteile dieser Technik und der Materialien erfahren Sie mehr bei Ihrem Partner für Verbandsmaterialien.

Der Werkstoff **SOFT-CAST** erforderte auch die Weiterentwicklung der Hilfsmittel, um das Anlegen, Modellieren, Anpassen und Abnehmen des **CASTES** zu vereinfachen. Mit führenden Herstellern von **SOFT-CAST** haben wir die Scherentechnik weiterentwickelt und verfeinert.

Entstanden sind die **BS-SOFT-CAST**-Scheren „**CLASSIC**“ und „**CONTUR**“, gefertigt aus rostfreiem Edelstahl und auf höchstem technischen Niveau.

Worin unterscheiden sich die **BS-SOFT-CAST**-Scheren von herkömmlichen und in allen Gipszimmern vorliegenden Scherentypen, das erfahren Sie in diesem Prospekt.

## “Linkshänder“

Um die Vielfalt der **BS-SOFT-CAST**-Scheren unter Beweis zu Stellen, haben wir auch die „**Linkshänder-Modelle**“ entwickelt.

Selbstverständlich ist das Linkshänder-Modell mit den gleichen Eigenschaften ausgestattet, wie das Standardmodell.



CAST 100 L	SOFT-CAST Schere, CLASSIC, LINKS, 18,0 cm
CAST 100 ML	SOFT-CAST Schere, CLASSIC, Multicolor LINKS, 18,0 cm
CAST 110 L	SOFT-CAST Schere, CONTUR, LINKS, 12,0 cm
CAST 110 ML	SOFT-CAST Schere, CONTUR, Multicolor LINKS, 12,0 cm

# „Contur“

Das Modell „Contur“ ist die optimale Ergänzung zu der BS-**SOFT-CAST**-Schere. Die Vorteile dieser „kleinen“ Schere:

**Kurzes Arbeitsteil** Präparieren an schwer zugänglichen Stellen  
**Mikrotom-Schliff** geringer Kraftaufwand bei hoher Schneidleistung



CAST 110 SOFT-CAST-Schere, CONTUR, 12,0 cm  
CAST 210 SOFT-CAST-Schere, CONTUR, 12,0 cm, rot  
CAST 310 SOFT-CAST-Schere, CONTUR, 12,0 cm, blau  
CAST 410 SOFT-CAST-Schere, CONTUR, 12,0 cm, grün  
CAST 510 SOFT-CAST-Schere, CONTUR, 12,0 cm, gelb  
CAST 610 SOFT-CAST-Schere, CONTUR, 12,0 cm, schwarz  
CAST 710 SOFT-CAST-Schere, CONTUR, 12,0 cm, pink  
CAST 810 SOFT-CAST-Schere, CONTUR, 12,0 cm, weiß



# „Multicolor“

Mit dieser Ausführung haben wir eine Schere mit „optischen“ Merkmalen entwickelt, die über alle Eigenschaften der „Classic“ und „Contur“-Modelle verfügt. Sie besticht durch ihr außergewöhnliches Design.

**Besondere Eigenschaften** höhere Oberflächenhärte durch besondere Beschichtung  
**Anwendung** Leichteres Entfernen der **CAST**-Rückstände, längere Einsatzdauer

CAST 100 M SOFT-CAST Schere,  
CLASSIC, Multicolor, 18,0 cm



CAST 110 M SOFT-CAST Schere,  
CONTUR, Multicolor, 12,0 cm



# „Spezial“

Das Modell „Spezial“ ist ein Mix der Modelle „Classic“ und „Contur“.

**Besondere Merkmale** Vereint Schneidekraft des **Classic**-Modells und Flexibilität des **Contur**-Modells.

**Anmerkung** Dieses Modell eignet sich nur für fortgeschrittene und erfahrene Anwender.



CAST 120 SOFT-CAST Schere,  
Spezial, kurz-abgewinkelt, 18,0 cm

# „Classic“

Das Modell „Classic“ ist mit einem **besonderen Schliff** versehen, er ermöglicht ein einfaches Durchtrennen, auch von mehreren Lagen des Soft-Castes, ohne dass der Anwender sehr hohen Druck anwenden muss.

**Ein leichtes und flexibles Arbeiten ist dabei einer der großen Vorteile.**



- CAST 100 SOFT-CAST Schere, CLASSIC, 18,0 cm
- CAST 200 SOFT-CAST Schere, CLASSIC, 18,0 cm, rot
- CAST 300 SOFT-CAST Schere, CLASSIC, 18,0 cm, blau
- CAST 400 SOFT-CAST Schere, CLASSIC, 18,0 cm, grün
- CAST 500 SOFT-CAST Schere, CLASSIC, 18,0 cm, gelb
- CAST 600 SOFT-CAST Schere, CLASSIC, 18,0 cm, schwarz
- CAST 700 SOFT-CAST Schere, CLASSIC, 18,0 cm, pink
- CAST 800 SOFT-CAST Schere, CLASSIC, 18,0 cm, weiß

